



FR

MASQUE DE PROTECTION LAVABLE ET RÉUTILISABLE – 15 LAVAGES

Le **Masque de protection réutilisable STERIPAN** est un masque individuel destiné au grand public. Son port est recommandé dans la lutte contre la propagation des virus et particulièrement pendant la crise sanitaire liée à la COVID-19. Avant la 1<sup>ère</sup> utilisation de votre masque, lavez-le impérativement en machine à 60°C pendant au moins 30 minutes, ainsi qu'entre chaque utilisation, conformément aux instructions indiquées dans la partie : « COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ? ».



**COMPOSITION : matière filtrante 100% Polypropylène non tissé.**

## AVERTISSEMENT

**Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.**

Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.

- Vérifiez toujours que le **masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.**
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**
- **La durée maximale d'utilisation est de 4 heures.**



## COMMENT PORTER LE MASQUE ?

### Avant de mettre le masque :

1. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
2. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
3. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
4. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

### Mettre le masque :

1. Tenez le masque par les lanières élastiques.
2. Placez-le au niveau de votre bouche.
3. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
4. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

### Port du masque :

1. Évitez de le toucher et de le déplacer.
2. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

### Changer son masque :

1. Quand vous avez porté le masque 4h.
2. Quand vous souhaitez boire ou manger.
3. Quand il devient difficile de respirer.
4. Si le masque s'humidifie.
5. Si le masque est endommagé.
6. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

### Pour l'enlever :

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
2. Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
3. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
4. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
5. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.

## COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ?



### Avant ouverture :

Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

### Pour le lavage :

1. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
2. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
3. Ce masque a été testé pour 15 lavages. Après 15 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
4. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en reformant les plis sans forcer.

### Après le lavage :

1. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches)
2. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
3. Repassez votre masque à la vapeur à une température de 120°C.
4. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

## SÉCURITÉ - EFFICACITÉ

1. Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 99 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.\*

2. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h.\*

\* Rapport de test IFTH N°2020-05-12-059-15



## AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

Attention : ces masques ne constituent en aucun cas des dispositifs médicaux au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux) ou des équipements de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Ces masques en tissu à usage non sanitaire ne garantissent pas une protection contre une éventuelle contamination. Ils ne sont pas destinés au personnel soignant, mais au grand public, personnes saines ou asymptomatiques.

## DÉCOMPTE D'UTILISATION DES MASQUES

Le masque peut être lavé 15 fois : après avoir lavé le masque avant la première utilisation, chaque masque est donc utilisable 15 fois. Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de votre masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :

Utilisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Masque															

### Fabriqué en France

N'hésitez pas à nous demander conseils en écrivant à :  
LBD – 10, Allée des Cascades PN2 - BP 67 092 Villepinte - 95 973 Roissy CDG, France

Retrouvez l'ensemble de nos produits ainsi que des conseils sur :  
[www.steripan.com](http://www.steripan.com)